

1. BrainTrainerPlus update manual

Om de BrainTrainerPlus™ up te daten heeft u nodig:


- Een internetverbinding
- Een internet kabel
- Een USB-toetsenbord



Cursostoetsen

Stap 1: Schakel de BrainTrainerPlus™ uit, sluit een USB toetsenbord aan en verbind de BrainTrainerPlus™ met het internet door middel van een kabel. Gebruik hiervoor eventueel de bijgeleverde blauwe internet kabel


Stap 2: Start de BrainTrainerPlus™ op en navigeer naar “**BrainTrainerPlus Update mode**”. Gebruik hier voor de cursortoetsen

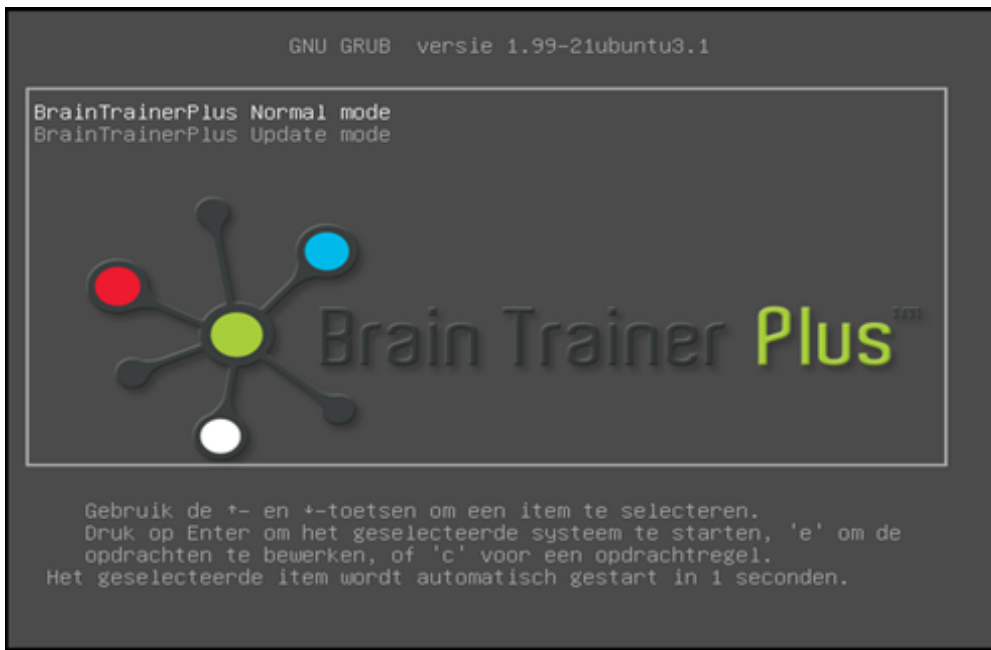


Let op: Voer de actie snel uit. De geselecteerde “**BrainTrainerPlus mode**” wordt automatisch gestart in 1 seconden. Wacht tot het update systeem opgestart is en naar updates heeft gezocht (zie foto stap 3). Wanneer de BrainTrainerPlus™ in “**BrainTrainerPlus Update mode**” wordt opgestart met een internetverbinding zal de datum en tijd automatisch aangepast worden.

Stap 3: Navigeer met de cursortoets naar “**Yes**” om de updates te installeren. Als er geen updates beschikbaar zijn

wordt de BrainTrainerPlus™ automatisch herstart in de “Normal mode”

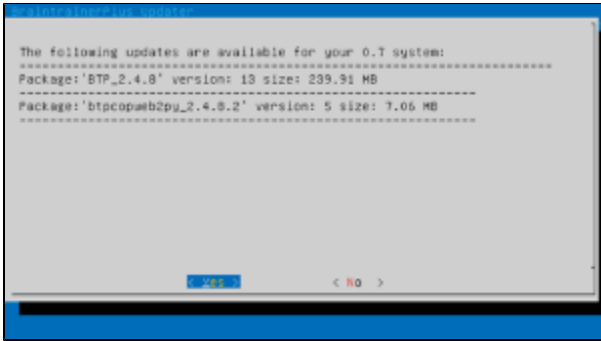

Stap 4: De updates worden gedownload en geïnstalleerd. Dit kan enige tijd duren afhankelijk van de grootte van de update. Het is belangrijk dat de BrainTrainerPlus™ met het internet verbonden blijft en aan blijft staan. Het scherm kan na enige tijd uitvallen, dit wilt niet zeggen dat de BrainTrainerPlus™ uit staat. Het updaten is klaar als de BrainTrainerPlus™ opnieuw is opgestart en in het scherm “KIES EEN GROEP” staat.

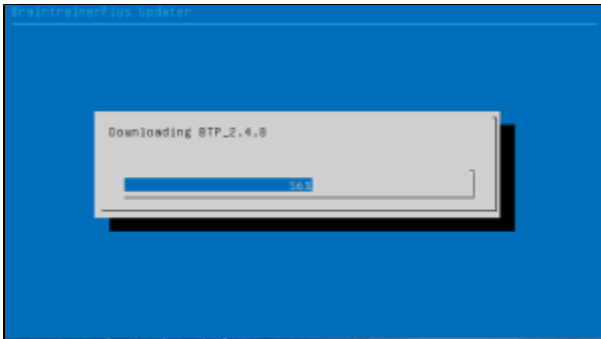

Het “KIES EEN GROEP” scherm. In het bovenste gedeelte van het scherm staat de huidige versie nummer.

